



## TST1- okład termiczny standard

### Opis produktu:

Okład termiczny standard znajduje zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), przykurczów, zapaleń mięśni, chorób stawów, kręgosłupa, zwichnięć, skręceń a także zaburzeń miesiączkowania. Wymiary: 20x30 cm

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## TST1- okład termiczny standard

**TST1 - okład termiczny** standard zapewnia do 30 minut terapii przy wykorzystaniu wilgotnego ciepła. Główne zastosowanie to leczenie chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), przykurczów, zapaleń mięśni, chorób stawów, kręgosłupa, zwichnięć, skręceń a także zaburzeń miesiączkowania. Może być używany wielokrotnie. Jest łatwy do podgrzewania i stosowania. Po zużyciu nie wymaga utylizacji. W 99,9% ulega biodegradacji.

### Początkowe moczenie zestawu termicznego

Jedynie przed pierwszym użyciem każdy okład należy odpowiednio przystosować. W tym celu należy potrząsnąć okładem tak, by spowodować równomierne rozproszanie materiału wypełniającego. Następnie należy włożyć okład do pojemnika i zalać wodą. Po moczeniu przez jedną godzinę okład jest gotowy do podgrzania.

### Podgrzewanie okładu

Zastosowanie kuchni parafinowych KP 22 i KP 56 firmy RESMED do podgrzewania okładów. Włożyć okład do dużego rondla (emaliowanego lub ze stali nierdzewnej) i napełnić wodą tak, aby woda całkowicie pokrywała okład. Podgrzewać najlepiej w temperaturze 70 - 80°C.

### Zastosowanie kuchenki mikrofalowej do podgrzewania okładu

Włożyć okład do naczynia odpornego na mikrofałe i zalać wodą. Ostrzeżenie: należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą podgrzewania podaną przez producenta kuchenki. Podgrzewać w temperaturze 70 - 80°C. Przy niezamierzonym krótkotrwałym zagotowaniu wody okład nie ulega

uszkodzeniu. Zastosowanie termalatora do podgrzania okładu. Należy postępować zgodnie z etapami podanymi w instrukcji termalatora.

### **Stosowanie okładu termicznego**

Okład termiczny powinien być owinięty minimum pięcioma warstwami ręczników flanelowych. Owinięty okład należy ułożyć na leczonej części ciała. Aby zróżnicować natężenie ciepła należy zmienić ilość ręczników.

### **Środki ostrożności przy używaniu okładów termicznych**

Nie należy kłaść okładu termicznego bezpośrednio na skórę. Może to doprowadzić do oparzeń skóry. Pacjent nie może leżeć na okładzie termicznym. Nie należy stosować okładu na niewrażliwą skórę lub powierzchnie o słabym ukrwieniu. Należy zachować większą ostrożność przy stosowaniu u dzieci i osób starszych. Jeżeli nie mamy zamiaru przez dłuższy czas używać okładu, należy go przechowywać w stanie suchym.

Okłady termiczne wpisane są do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR 014992.

**Informacje:**

**Model:**