

THF1 - okład termiczny półrozmiar



Opis produktu:

Okład termiczny półrozmiar znajduje zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), przykurczów, zapaleń mięśni, chorób stawów, kręgosłupa, zwichnięć, skręceń a także zaburzeń miesiączkowania. Wymiary: 12x30 cm

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

THF1 - okład termiczny półrozmiar

THF1 - okład termiczny półrozmiar zapewnia do 30 minut terapii przy wykorzystaniu wilgotnego ciepła. Główne zastosowanie to leczenie chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), przykurczów, zapaleń mięśni, chorób stawów, kręgosłupa, zwichnięć, skręceń a także zaburzeń miesiączkowania. Może być używany wielokrotnie. Jest łatwy do podgrzewania i stosowania. Po zużyciu nie wymaga utylizacji. W 99,9% ulega biodegradacji.

Początkowe moczenie zestawu termicznego

Jedynie przed pierwszym użyciem każdy okład należy odpowiednio przystosować. W tym celu należy potrząsnąć okładem tak, by spowodować równomierne rozproszanie materiału wypełniającego. Następnie należy włożyć okład do pojemnika i zalać wodą. Po moczeniu przez jedną godzinę okład jest gotowy do podgrzania.

Podgrzewanie okładu

Zastosowanie kuchni parafinowych KP 22 i KP 56 firmy RESMED do podgrzewania okładów. Włożyć okład do dużego rondla (emaliowanego lub ze stali nierdzewnej) i napełnić wodą tak, aby woda całkowicie pokrywała okład. Podgrzewać najlepiej w temperaturze 70 - 80°C.

Zastosowanie kuchenki mikrofalowej do podgrzewania okładu

Włożyć okład do naczynia odpornego na mikrofałe i zalać wodą. Ostrzeżenie: należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą podgrzewania podaną przez producenta kuchenki. Podgrzewać w temperaturze 70 - 80°C. Przy niezamierzonym krótkotrwałym zagotowaniu wody okład nie ulega

uszkodzeniu. Zastosowanie termalatora do podgrzania okładu. Należy postępować zgodnie z etapami podanymi w instrukcji termalatora.

Stosowanie okładu termicznego

Okład termiczny powinien być owinięty minimum pięcioma warstwami ręczników flanelowych. Owinięty okład należy ułożyć na leczonej części ciała. Aby zróżnicować natężenie ciepła należy zmienić ilość ręczników.

Środki ostrożności przy używaniu okładów termicznych

Nie należy kłaść okładu termicznego bezpośrednio na skórę. Może to doprowadzić do oparzeń skóry. Pacjent nie może leżeć na okładzie termicznym. Nie należy stosować okładu na niewrażliwą skórę lub powierzchnie o słabym ukrwieniu. Należy zachować większą ostrożność przy stosowaniu u dzieci i osób starszych. Jeżeli nie mamy zamiaru przez dłuższy czas używać okładu, należy go przechowywać w stanie suchym.

Okłady termiczne wpisane są do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR 014992.

Informacje:

Model: