

Chłodzące okłady do terapii uciskowej Dr Aktive



Opis produktu:

Chłodzące okłady do terapii uciskowej Dr Aktive są elementem **rehabilitacji** zalecanym po **zabiegach chirurgicznych**, w przypadku **urazów mięśni**, przyczepów **ścięgien**, czy **terapii obrzęków**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Chłodzące okłady do terapii uciskowej Dr Aktive są elementem **rehabilitacji** zalecanym po **zabiegach chirurgicznych**, w przypadku **urazów mięśni**, przyczepów **ścięgien**, czy **terapii obrzęków**. **Terapia zimnem**, inaczej **krioterapia** to idealny sposób na schłodzenie tkanek po intensywnym wysiłku fizycznym, po **kontuzji**, czy w ramach **programu rehabilitacji**. **Terapia uciskowa** połączona z **krioterapią** pomaga zmniejszyć ból, **obrzęk** i przyspieszyć proces gojenia **uszkodzonych tkanek**.

Dostępne okłady uciskowo-chłodzące:

[img-13359-left-home_default]	[img-13356-left-home_default]	[img-13355-left-home_default]
Okład na ramię i bark - krioterapia i kompresja	Okład na kolano - krioterapia i kompresja	Okład na kostkę - krioterapia i kompresja

Cechy charakterystyczne opasek uciskowo-chłodzących Dr Aktive:

- **Chłodząca terapia uciskowa:**
 - Połączenie wymiennego, żelowego okładu chłodzącego i pompy powietrznej pozwalają użytkownikowi na jednoczesne zastosowanie ucisku i krioterapii w obrębie

uszkodzonej tkanki, w celu zmniejszenia dyskomfortu i obrzęku i redukcji bólu.

- **Zdejmowany kompres żelowy**
 - Okłady Dr Aktiv są wyposażone w odpinaną żelową wkładkę, którą należy umieścić w lodówce przed użyciem.
- **Odłączana ręczna pompka**
 - Działanie uciskowe zachodzi przez napełnianie komór powietrznych za pomocą ręcznej pompki z dwukierunkowym zaworem odcinającym. Użytkownik w pełni kontroluje poziom kompresji.
- **Wysokiej jakości, oddychająca konstrukcja z neoprenu**
 - Okłady są wykonane z oddychającego, miękkiego, nadającego się do prania neoprenu.
- **Regulowane zapięcia rzepowe**
 - Szerokie paski zapinane na rzepy umożliwiają łatwe dopasowanie i doskonałą regulację.
- **Uniwersalne dopasowanie**
 - Każda opaska wykonana jest w rozmiarze uniwersalnym, może być używana na prawej i lewej kończynie.
- **Bezpieczne i higieniczne**
 - Opaski dostarczane są z zamykaną plastikową torbą, która idealnie nadaje się do ponownego użycia po włożeniu paczki żelowej do zamrażarki lub lodówki.
- **Opatentowana konstrukcja**
 - Ta opatentowana konstrukcja oferuje najbardziej ekonomiczną na rynku opcję, łączącą krioterapię i kompresję.
- **Pranie ręczne**
 - Opaski mogą być prane ręcznie.

Wskazania:

Okłady uciskowo-chłodzące Dr Aktiv można stosować w leczeniu bólu pooperacyjnego i **obrzęku**, w łagodzeniu zmęczenia mięśni, **urazów sportowych**, zwichnięć i skręceń.

Instrukcja użycia:

- Przechowuj w lodówce lub zamrażaj opakowanie z żelem przez co najmniej 2 godziny przed użyciem.
- Umieść opakowanie z żelem w opasce.
- Umieść opaskę na uszkodzonej kończynie, zabezpieczając ją za pomocą pasków (pomiędzy ciałem a opaską chłodzącą powinna być umieszczona warstwa zabezpieczająca, np. odzież, ręcznik).
- Przykręć rurkę pompki do przełącznika On / Off i ustaw przełącznik w pozycji "On".
- Użyj pompki, aby napełnić powietrzem komory do komfortowego poziomu kompresji.
- Możesz zostawić rurkę na miejscu lub usunąć ją w razie potrzeby (ustaw przełącznik w pozycji "Off", jeśli chcesz usunąć rurkę i zachować kompresję).
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utrzymuj kompresję przez 10 minut, a następnie wyłącz ją na 10 minut, aby dać skórze odpocząć. Następnie powtórz czynności 2-3 razy.

Środki ostrożności

- Stosuj tylko do użytku zewnętrznego.
- Opakowania z żelem nie można podgrzewać ani używać jako gorącego okładu.
- Nie używaj opaski bezpośrednio na otwarte rany.
- Nie należy zasypiać podczas terapii, ponieważ zimny okład może uszkodzić skórę.

Dane techniczne:

Okład żelowy:	Okład żelowy może być przechowywany w lodówce lub zamrażarce
Waga:	1.3 kg
Gwarancja:	1 rok

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Opaski do terapii kompresyjnej Dr Active: na ramię i bark, na kolano, na kostkę