

Aquai - urządzenie do masażu membranowego




Opis produktu:

Łóżko do masażu membranowego Aquai z funkcją utrzymywania stałej temperatury wody i gotowymi programami masażu przeznaczone jest do przeprowadzania zabiegów masażu membranowego.

Łóżko do hydromasażu na sucho jest specjalnie zaprojektowanym urządzeniem do relaksacji i rehabilitacji.

Zobacz prezentację produktu

Zdjęcia produktu:

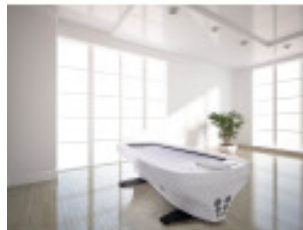

Szczegółowy opis produktu:

Aquai - Urządzenie do masażu membranowego

Urządzenie Aquai służy do wykonywania zabiegów masażu membranowego. Aquai ma szeroki zakres zastosowań, obejmujących poprawę kondycji i samopoczucia. Doskonale sprawdza się zarówno w centrach rehabilitacji, jak i w gabinetach odnowy biologicznej.

W czasie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym, uderzają w nieprzepuszczalną membranę, dzięki czemu pacjent może doświadczyć korzyści wynikających z hydromasażu, nie mając bezpośredniego kontaktu z wodą.

Urządzenie do masażu membranowego Aquai wyposażone jest w funkcje regulacji czasu trwania zabiegu, czasu trwania jednego etapu sekwencji i wyboru stref masażu pracujących w danym etapie sekwencji. Urządzenie Aquai podzielone jest na 6 stref masujących. Regulowana jest także temperatura wody. Aby zapewnić komfort podczas zabiegu, temperatura wody jest podtrzymywana przez cały czas wykonywania zabiegów.

Cechy charakterystyczne

6 programowalnych i niezależnych stref

Wszystkie dysze mogą pracować jednocześnie

Dysze do suchego masażu wodnego o zwiększonej trwałości

6 programów standardowych

1 program użytkownika

Ustawienie temperatury powierzchni membrany regulowane w zakresie od 30 do 40°C

Regulowany czas zabiegu (1-30 min)

Opóźniony start w zaprogramowanych godzinach

Regulowana częstotliwość i kolejność stref

Zintegrowany system ogrzewania

Wewnętrzny system chłodzenia wody utrzymuje temperaturę wody w zaprogramowanych godzinach niezależnie od liczby zabiegów

Brak konieczności stałego podłączenia do kranu

Łatwo dostępny nowoczesny kolorowy panel dotykowy

Oświetlenie LED na spodzie urządzenia

interfejs przyjazny dla użytkownika

Ekran główny

Dostosowywanie ustawień przed sesją zabiegową i w jej trakcie

Wybór wymaganego programu, długości zabiegu, sekwencji zmian stref i innych ustawień podczas sesji

Ekran powitalny po 3 minutach bezczynności

Ekran konfiguracji

Regulacja temperatury wody w zakresie od 30 do 40°C

Wybór koloru dolnego podświetlenia LED

Łatwy dostęp do ekranu edycji programu użytkownika

Ekran konfiguracji automatycznego przygotowania

Szybki dostęp do ustawień zegara

Edycja programu użytkownika

Możliwość wyboru strefy dla każdego kroku

Wyświetlanie aktualnie działających stref (żółty) i kolejnych stref (niebieski)

Do 6 stref pracujących w sekwencji programu

Do 3 stref pracujących w tym samym czasie

6 niezależnych stref

Jakim pacjentom można polecić Aquai?

RELAKS

Współczesne tempo życia, praca i problemy rodzinne sprawiają, że wielu pacjentów jest bardziej zestresowanych niż kiedykolwiek. Mają zbyt mało czasu dla siebie. Dzięki AQUAI możesz zaoferować im idealny sposób na relaks wraz z różnymi efektami prozdrowotnymi.

TERAPIA

Ostatnie badania wykazały, że ponad 70% naszej populacji cierpi na bóle pleców lub inne przewlekłe schorzenia. Wymagają one szczególnej uwagi, a AQUAI stanowi idealne uzupełnienie przepisanego leczenia.

ZAPOBIEGANIE

AQUAI oferuje korzystną usługę dla pacjentów szczególnie zainteresowanych swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem, którzy utrzymują swoje ciało w formie, zdrowo się odżywiają i starają się wzmocnić swój układ odpornościowy i metabolizm.

ROZLUŻNIENIE MIĘŚNI

Bardzo powtarzalne czynności, siedzenie, stanie w miejscu, wszelkiego rodzaju praca biurowa lub wysiłek fizyczny zwykle prowadzą do bólu pleców. Występują one zarówno w okolicy ramion i szyi, jak i w okolicy lędźwiowej.

stany zmęczenia po intensywnym wysiłku fizycznym,

stany przeciążenia po pracy statycznej,

profilaktyka zaburzeń układu krążenia,
nerwice typu psychogenne,
otyłość i nadwaga.

Korzyści z leczenia

Poprawa krążenia krwi i przyspieszenie usuwania produktów przemiany materii,
poprawa transportu tlenu do mięśni,
poprawa przepływu limfy,
redukcja stresu, efekt relaksacyjny i dobre samopoczucie.

Urządzenie Aquai zaprojektowane przez czołowych designerów cieszy oko i komponuje się z każdym gabinetem zabiegowym, salą wellness czy strefą relaksu. Delikatne ledowe podświetlenie podstawy pozwala na użytkowanie Aquai w zaciemnionych pomieszczeniach, co potęguje działanie relaksacyjne.

Szybki zwrot z inwestycji

Najlepsza relacja jakości do ceny sprawia, że urządzenie cechuje najszybszy zwrot z inwestycji w swojej klasie. Znikome koszty eksploatacji sprawiają, że zysk pozostaje w placówce dysponującej urządzeniem Aquai.

W trosce o środowisko

Aquai po napełnieniu nie pobiera więcej wody, korzystając z obiegu zamkniętego. Dzięki temu urządzenie nie musi być stale podłączone do sieci wodnej — oszczędzasz pieniądze i środowisko.

Niskie koszty eksploatacji

Jedynym znaczącym kosztem w użytkowaniu Aquaia jest energia elektryczna. Dzięki temu Aquai może zwrócić się już nawet w 3 miesiące!*

Oszczędność czasu

Dzięki funkcji zaprogramowania godziny gotowości do pracy urządzenie szybciej uruchomi podgrzewanie wody, aby być w pełni gotowym we wskazanym czasie.

Funkcje opcjonalne
wymagające instalacji

System ułatwiający sprzedaż zabiegów poprzez wykorzystanie kart z kredytem; w zestawie oprogramowanie umożliwiające doładowanie kart.

...

Zintegrowany system audio z głośnikami wysokiej jakości i możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak wieże Hi-Fi lub MP3.

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	237 x 114 x 70
Pojemność [l]:	220
Waga [kg]:	190
Maks. obciążenie [kg]:	135
Kolor niecki:	Biały
Klasa bezpieczeństwa:	I
Zasilanie [V/Hz]:	230/50 albo 400/50

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Niecka i jej obudowa wykonane są z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym. Materiały te gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Instalacja wodna, z wyjątkiem przyłączy i zaworów, wykonana jest z PVC, co zapewnia jej niezawodność.

Informacje:

Szerokość: 1140 mm
 Długość: 2370 mm
 Wysokość: 700 mm
 Zasilanie: 230 V / 50 Hz albo 400 V / 50 Hz
 Maksymalna masa pacjenta: 135 kg
 Masa urządzenia: 190 kg
 Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: Klasa I
 Pojemność użytkowa: 220 l
 Kolor niecki: Biały

Model:

Audio: nie, tak
 Aquai Card manager: nie, tak
 Rodzaj zasilania AQUAI: 230V, 400V